



ISTRUZIONI PER L'USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA

PER INDOSSARLA

- lavarsi le mani
- sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca;
- inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e aprendo la mascherina portare gli elastici dietro le orecchie
- tirare la mascherina chirurgica dall'alto e dal basso per aprire le pieghe e distenderla completamente sul viso
- modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al viso

MENTRE LA SI INDOSSA

- evitare di toccare la mascherina con le mani
- se proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina

PER TOGLIERLA E SMALTIRLA

- lavarsi le mani
- afferrare gli elastici lateralmente
- portare lentamente in avanti le mani
- gettare la mascherina all'interno dei contenitori collocati sul posto
- lavarsi le mani